

NL **Gebruiksaanwijzing** | Lees ook de gebruiksaanwijzing



Bij zwangerschap en geïnfecteerde wonden



1. Spoel de wond schoon met een fysiologische oplossing

😊 Bijvoorbeeld NaCl 0,9%, water.

😊 Bij voorkeur met **AdvaCyn Wound Care**

Gebruik géén desinfectanten



2. Spray Granulox gelijkmatig vanaf 5 -10 cm in de wond

Om indroging van de spraykop te voorkomen: verwijder na gebruik de spraykop en spoel deze schoon, vervolgens met een alcoholdoekje schoonmaken en terugplaatsen.



3. Dek de wond af met een (semi)permeabel verband

😊 Bijvoorbeeld met **Balance**

Geén occlusief verband gebruiken

😊 Hydropolymeerverband / Foamverband / Netgazen / Superabsorbers / Hydrofibers

😊 Hydrogels / Film / Alginaten



☹ Hydrocolloïd dressings / Occlusieve films / VAC-Systemen

Opslag: • Korte behandelingsduur: kamertemperatuur, max. 25°C. • Bij dagelijks gebruik tot 6 weken houdbaar bij kamertemperatuur. • langere periode: bewaren in koelkast, 2°C - 8°C