



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

GEbruIKSAANWIJZING

BIOSPRAY

Collageenpoeder in verstuiver.

Medisch hulpmiddel.

Samenstelling

Collageen

Excipienten: gemodificeerd rijstzetmeel, miglyl

Toegestane oplosmiddelen en drijfgas

Indicaties

Voor de behandeling van zonnebrand, lichte brandwonden, huidirritaties, oppervlakkige wonden en ulcera, luier- en incontinentie-uitslag, ontvellingen en schaafwonden en als hemostaticum.

Hoewel BIOSPRAY uitstekende hemostatische eigenschappen heeft, mag het bij ernstige bloedingen niet gebruikt worden ter vervanging van ligatie of directe compressie. De werkzaamheid van BIOPAD® wordt niet beïnvloed door anticoagulantia.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus staat onder druk, BIOSPRAY niet gebruiken als deze is beschadigd.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Niet gebruiken als de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. De uiterste houdbaarheidsdatum geldt voor de gehele verpakkingseenheid, ervan uitgaande dat deze naar behoren is opgeslagen. Na eerste gebruik kan BIOSPRAY worden gebruikt tot de spuitbus leeg is.

Vóór gebruik van BIOSPRAY eerst de wond reinigen en desinfecteren.

Geadviseerd wordt het product niet te gebruiken in combinatie met stoffen of geneesmiddelen die als barrière kunnen fungeren en daardoor de werkzaamheid van BIOSPRAY opheffen.

Belangrijk: eventueel necrotisch of purulent weefsel verwijderen vóór het aanbrengen van BIOSPRAY

Houd de spuitbus op ongeveer 15cm afstand van de wond en spuit gedurende één of twee seconden over het gehele wondoppervlak. Bij het niet in acht nemen van de juiste afstand kan contact van het product met de wond een vriesgevoel geven. Dit gaat echter snel over, zonder nadelige gevolgen voor de huid.

Na opbrengen van de BIOSPRAY de wond zo nodig afdekken met een pleister of gaas. Bij kinderen fungeren huidplooien of luiers als een natuurlijke afdekking.

Eventueel op de omliggende huid opgebrachte BIOSPRAY kan worden verwijderd zonder afbreuk te doen aan de werkzaamheid van het product.

Bij vervolgbehandelingen is het niet nodig restanten van een eerder aangebrachte laag BIOSPRAY te verwijderen.

Plaatselijk gebruik van BIOSPRAY heeft voor zover bekend nog nooit geleid tot overgevoeligheidsklachten.

Contra-indicaties/bijwerkingen

BIOSPRAY niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat één of meer van de volgende aandoeningen in de familie voorkomen: auto-immuunziektes, anafylactoïde reacties of overgevoeligheid voor een of meer van de bestanddelen. BIOSPRAY ook niet gebruiken bij personen die een desensibilisatiebehandeling ondergaan wegens overgevoeligheid voor vleesproducten. BIOSPRAY is een non-allergeen product. Er zijn geen meldingen bekend van overgevoeligheidsverschijnselen of bijwerkingen na gebruik.

BIOSPRAY heeft hemostatische eigenschappen, maar mag bij ernstige bloedingen niet gebruikt worden ter vervanging van ligatie of directe compressie onder strikte medisch of paramedische supervisie.

Bewaarvoorschrift

Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen.

Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C.

Hergebruik van het product

Na elk gebruik de spuitbus zorgvuldig afsluiten met de bijgeleverde bescherm dop. In geval van onvolledige of gebrekkige verstuiving van het poeder de spuitmond verwijderen en de spuitopening reinigen met lauw water. Dan de spuitmond droogwrijven en terugplaatsen met de luchtstroom naar buiten gericht.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Spuitbus staat onder druk.

Product bewaren in een droge plaats uit de buurt van warmtebronnen.

Beschermen tegen direct zonlicht, niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C.

Niet prikken in de spuitbus of deze verbranden, ook niet na gebruik.

Niet spuiten in open vuur of op smelende voorwerpen.

Weghouden van brandhaarden.

Niet roken tijdens gebruik van het product.

Niet gebruiken in kleine en/of afgesloten ruimtes.

Milieuvriendelijk, drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Spuitbus na gebruik zorgvuldig afvoeren (niet in het milieu laten komen).

Product niet in ogen of oren spuiten. Inademing vermijden.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

PRODUCENT

EURORESEARCH s.r.l. - Via Larga 2 -
20122 Milaan (It.) Ph.++39 028055660



CE 0373