

## SEMI-PERMEABELE, ZELFKLEVENDE PU-FOLIE VOOR AQUAFILAMENTVERBANDEN

Deze semi-permeabele, hypoallergene polyurethaanfolie is bestemd voor het fixeren van verband en ondersteunt het principe van de actieve, vochtige wondbehandeling.

### WERKINGSMECHANISME

[TEXTUS] biofix® is speciaal ontwikkeld voor het afdekken van vochtverbanden. Het fixerende verband is van buiten waterafstotend, maakt gas- en verdampingsuitwisseling mogelijk, en beschermt het verband tegen het binnendringen van bacteriën en vochtig worden. [TEXTUS] biofix® maakt een huidvriendelijke, pijnloze verbandwissel mogelijk.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

[TEXTUS] biofix® is geschikt voor het afdekken van verbanden bij oppervlakkige tot diepe, primair en secundair genezende wonden (bijv. postoperatieve wonden), evenals voor het fixeren van verbanden bij alle chronische wonden, die zich in de reinigings- tot re-epithelialisatiefase bevinden (bijv. ulcera cruris, decubitus, diabetische ulcera) en probleemwonden van een andere oorsprong.

### TOEPASSING

1. [TEXTUS] biofix® wordt aanbevolen voor het fixeren van de [TEXTUS]-aquafilamentverbanden, bijv. [TEXTUS]bioactiv®, [TEXTUS] balance® en [TEXTUS] biotül®, en kan uiteraard ook met alle andere op de markt beschikbare wondvullers en secundaire verbanden gecombineerd worden.
2. De wondomgeving moet voor een goede bevestiging droog en vetvrij zijn.
3. [TEXTUS] biofix® moet voor het toepassen op maat geknipt worden en moet ongeveer 3-4 cm groter zijn dan de wond. Breng het zonder trek aan en druk het zachtjes aan.
4. De [TEXTUS] biofix® blijft beter plakken als het na het aanbrengen met de hand verwarmd wordt.
5. Het verwisselen van het verband hang voornamelijk af van het verwisselinterval van het primaire verband.

### CONTRA-INDICATIES

Geïnfecteerde en sterk exsuderende wonden.  
Overgevoeligheid voor acrylaatlijm.

### BIJWERKINGEN

[TEXTUS] biofix® wordt goed verdragen.

In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties van de huid optreden door contact met acrylaatlijm, bijvoorbeeld onder de vorm van rood worden van de huid, jeuk, nattende huid of blaasjes.

### SAMENSTELLING

[TEXTUS] biofix® is een niet-steriele, 0,4 mm dunne, zelfklevende folie van polyurethaan. De folie is goed rekbaar en waterafstotend, en beschikt over een waterdampdoorlaatbaarheid (MVTR) van 840 g/m<sup>2</sup>/24 uur (+/- 10%)\*. De acrylaatlijm is in water oplosbaar en kan zonder resten achter te laten verwijderd worden. [TEXTUS] biofix® bevat geen oplossingsmiddelen of latex en is geurneutraal.

### GEbruIKSAANWIJZING

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. 'Uiterste gebruiksdatum' - zie het etiket op de verpakking. De werkskenmerken kunnen uitsluitend bij eenmalig gebruik gegarandeerd worden. Droog en op kamertemperatuur bewaren.

### VERPAKKINGEN DIE IN DE HANDEL WORDEN GEBRACHT

15 cm x 2 m 1 rol per verpakking

### FABRIKANT

**bioCell Biotechnologie GmbH**  
Margeritenweg 4  
D - 51674 Wiehl, Duitsland  
www.bioCell.de  
info@bioCell.de

### CONTACT

**bioCell Biotechnologie GmbH**  
Oberstaat 6  
D - 51766 Engelskirchen  
Fon 02263-92917-0  
Fax 02263-92917-10

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 13485:2007

\* MVTR volgens DIN EN 13726-2

Datum van het maken van deze bijsluit: 01.2012

