

# [TEXTUS] heal®

(NL)

## HYALURONSPRAY VOOR HET BEVORDEREN VAN DE WONDGENEZING

[TEXTUS] heal® is een hyaluronspray voor het bevorderen van de wondgenezing bij stagnerende wonden of al granulerende wonden en voor de genezing van nieuwe huidlesies (plaatselijke toepassing).

### TOEPASSINGSGBIEDEN

[TEXTUS] heal® dient voor uitwendige, plaatselijke behandeling van wonden vanaf de granulatiefase en uitwendige huiddefecten zoals: ulcera, decubitus, diabetisch voetsyndroom, eerste- en tweedegraadsverbrandingen, huiddonorplaatsen, schaafwonden, enz.

Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van [TEXTUS] heal® is een niet-geïnfekteerde en schone wond.

### DOSERING EN TOEPASSING

1. Twee of meer sprayverbanden per verbandwisseling, bij normale intervallen voor het verwisselen van verband.
2. Door de drievoudige bescherming tegen herbesmetting van de sprayfles kan de spray bij meerdere patiënten worden toegepast.

V voorkom contact met de wond door ten minste 15 cm afstand te houden.

3. Spray [TEXTUS] heal® direct op de niet-geïnfekteerde en schone wond, en dek met een steriel verband, bijvoorbeeld een aquafilamentverband als [TEXTUS] balance®, af. Het is geen probleem als daardoor de wondomgeving eventueel vochtig wordt.
4. Fixeer het verband (zie punt 3) semipermeabel (bijvoorbeeld met [TEXTUS] biofix®) om het tegen uitdroging te beschermen, waarbij u rekening houdt met de wondomgeving en het behandelde huidgebied.

### SAMENSTELLING

Belangrijkste bestanddeel: 0,2 % hyaluronzuur-natriumzout in Ringer-oplossing. Bevat geen conserveringsmiddelen.

### CONTRA-INDICATIES

Geïnfekteerde en verontreinigde wonden (bijvoorbeeld wonden met aanslag en/of necrose).  
Gelijktijdige toepassing van antiseptica.

### BIJWERKINGEN

Omdat [TEXTUS] heal® een synthetisch middel is en daardoor vrij is van dierlijke bestanddelen, zijn tot nu toe geen bijwerkingen bekend.

### GEBRUIKSAANWIJZING

De inhoud is steriel mits de verpakking onbeschadigd is.

'Uiterste gebruiksdatum' - zie het etiket op de verpakking; echter maximaal 12 weken na het eerste gebruik. Droog en op kamertemperatuur bewaren.

### VERPAKKINGEN DIE IN DE HANDEL WORDEN GEBRACHT

15 ml, 1 stuks per verpakking

15 ml, 3 stuks per verpakking

### FABRIKANT

biocell Biotechnologie GmbH  
Margeritenweg 4  
51674 Wiehl, Duitsland  
www.biocell.de  
info@biocell.de  
Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:13485 / DIN EN ISO 13485:2007

### CONTACT

biocell Biotechnologie GmbH  
Oberstaat 6  
51766 Engelskirchen, Duitsland  
Telefoon +49-2263-92917-0  
Fax +49-2263-92917-10

