

OASIS Extracellular Matrix ondersteunt het eigen genezingsproces van het lichaam met behulp van een natuurlijke, intacte extracellulaire matrix.¹

OASIS biedt flexibiliteit en veelzijdigheid voor verschillende behoeften bij acute en chronische wonden, zoals: drukulcera, veneuze ulcera, chronische vasculaire ulcera, diabetische ulcera, traumatische wonden (schaafwonden, rijtwonden, huidscheuren), tweedegraads brandwonden, donorsites/transplantaten, lekkende wonden, chirurgische wonden (na Mohs-chirurgie, laserchirurgie, voetchirurgie en wonddehiscentie)


Aanbrengen



Voorbereiden

1


Débrideer het wondbed grondig om alle barrières te verwijderen die zouden kunnen voorkomen dat OASIS direct integreert met levensvatbaar weefsel (bijvoorbeeld gedevasculariseerd weefsel, vervelde huid, vuil of gestold bloed). Zorg ervoor dat overmatig bloeden, overmatig exsudaat en eventuele infecties onder controle zijn voordat u het middel aanbrengt OASIS.

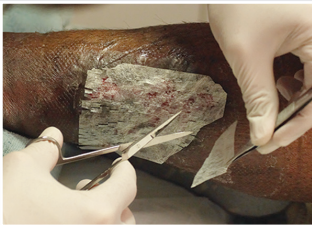

OASIS aanbrengen

2

Selecteer de juiste afmeting OASIS. Plaats en knip een vel op maat om het wondoppervlak te bedekken, zodat het iets over de wondranden heen valt. Als er meerdere vellen nodig zijn om de wond te bedekken, overlapt u de randen enigszins. De gebruiker kan ervoor kiezen om het vel vast te zetten met tape, hechtdraad of nietjes.

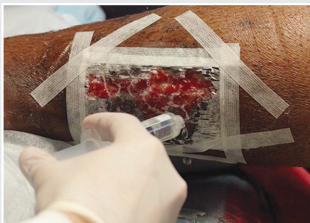

3

Opnieuw bevochtigen

Bevochtig OASIS voorzichtig met steriele zoutoplossing.



Beschermen met niet-klevend verband

4

Breng een poreus, niet-klevend verband aan over OASIS en fixeer met behulp van de gekozen fixatiemethode. Dit niet-klevende verband zal helpen OASIS te laten hechten en beschermen tijdens het verwisselen van secundair verband, en tegelijkertijd mogelijk maken dat secundaire lagen vocht worden gereguleerd. Om schade aan pas geïntegreerde OASIS te voorkomen, zorgt u ervoor dat het niet-klevende verband pas wordt verwisseld wanneer de wond moet worden beoordeeld, meestal na 3-7 dagen.

¹ Hodde J, Janis A, Ernst D, Zopf D, Sherman D, Johnson C. Effects of sterilization on an extracellular matrix scaffold: Part I. Composition and matrix architecture. *J Mater Sci Mater Med.* 2007;18:537-543.

Aanbrengen (vervolg)

Wondvocht reguleren

Een vochtige omgeving is noodzakelijk voor succesvolle integratie van OASIS. Beoordeel de wond om de juiste laag te bepalen voor het vasthouden van vocht.

5

- Als u tevreden bent met de vochtigheidsgraad van de wond, brengt u een vochtbarrière aan (bijv. vaseline).
- Als de wond te droog is, brengt u een vochtafgevend laag aan (bijv. hydrogel).
- Als de wond te nat is, brengt u een absorberende laag aan (bijv. gaas, schuim, alginaat).

Breng een afdekverband aan om alle lagen rond de wond te beschermen en vast te zetten. Gebruik, indien nodig, compressieverband en offloading.

Na het aanbrengen van het afdekverband moeten de lagen zoals hieronder getoond, zijn aangebracht.



Voorlichten

6


Adviseer patiënt en verzorgers om van het niet-klevende verband en onderliggende OASIS af te blijven. Afdekverband en de vochtregulerende laag kunnen naar behoefte tussen bezoeken worden verwisseld, maar het niet-klevende verband mag alleen worden verwijderd door de arts die OASIS heeft aangebracht.

Vertel patiënten en verzorgers eveneens dat de wondgeur sterker kan zijn als het wondbed gedurende 3-7 dagen onaangeroerd blijft, zoals in deze instructies is aangegeven. Vermoeden van infectie dient met het oog te worden bevestigd en mag niet alleen op geur zijn gebaseerd.

Behandelen

Beoordelen

Verwijder na 3-7 dagen voorzichtig het niet-klevende verband en beoordeel de wond.

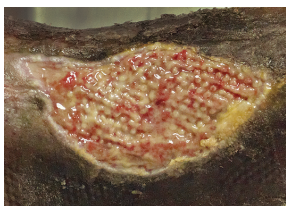

1

Aspect: OASIS kan volledig zijn opgenomen in het wondbed of gedeeltelijk zijn opgenomen. Als het gedeeltelijk is opgenomen, is het normaal dat OASIS gele/geelbruine gel vormt. Dit kan worden aangezien voor vervelde huid, maar verwijder de gel of OASIS die vastzit aan de wond, **niet**. Reinig het wondoppervlak voorzichtig met steriele zoutoplossing.

Vocht: controleer OASIS en wondcondities zorgvuldig om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn. (Zie stap 5.)



2

OASIS opnieuw aanbrengen

Als er bij de wond geen sprake is van infectie en necrotisch weefsel, maar de wond is niet volledig geëpithelialiseerd, brengt u pas voorbereid OASIS aan op plaatsen waar geen OASIS over is met behulp van stappen 2-5.

Bezoek voor meer informatie:
 BiologiQ
 Watermanstraat 72
 7324 AK Apeldoorn
 Netherlands
 info@biologiq.nl
 www.biologiq.nl