



200 mm

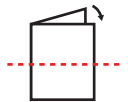

120 mm

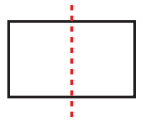

AdvaCyn[®]

hydrogel



Oculus Technologies of México S.A. de C.V.
Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte
Zip Code 45130. Zapopan, Jalisco, México.
Phone: + 52 33 38 33 67 22



Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.
(Formerly Oculus Innovative Sciences Netherlands B.V.)
Boven de Wolfskuil 3, C30-C32,
6049 LX Hertan/Roermond The Netherlands
Phone: +31 (0)475 318 666
Fax: +31 (0)475 318 342
www.sonomapharma.eu

10CRD-026 Rev. 06
June 10th 2021
EOCAC-715 ED-07



AdvaCyn[®]

hydrogel

Gebruiksaanwijzingen



Droog houden



Breekbaar, met zorg hanteren



Uit de zon houden

200 mm

Gebruiksaanwijzingen

NL

Indicaties voor gebruik: AdvaCyn® Hydrogel is een geëlektrolyseerde hydrogel bestemd voor gebruik bij het debridement en bevochtigen van acute en chronische wonden, zweren, snijwonden, abrasies en brandwonden, waaronder wonden in lichaamsholten als de mondholte, neusholte of het oor. Natriumhypochloriet en hypochloorzuur zijn hulpstoffen die een plaatselijk antimicrobieel effect kunnen hebben. Door de microbiële belasting te verlagen en voor een vochtige omgeving te zorgen stelt de oplossing het lichaam in staat zijn eigen genezingsproces uit te voeren. AdvaCyn® Hydrogel kan breed worden toegepast bij een uitgebreide wondbehandeling en is veilig op de slijmvliezen.

Behandeling: AdvaCyn® Hydrogel is biocompatibel voor het geïndiceerde gebruik, niet irriterend voor de menselijke huid, ogen of keel en het sensibiliseert de huid niet. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig bij het omgaan met de oplossing.

Bewaring: AdvaCyn® Hydrogel dient in het oorspronkelijke afgedichte flesje bij kamertemperatuur te worden bewaard. Bewaren bij kamertemperatuur en zorgen dat het product niet bevriest. Het is niet brandbaar. Na gebruik dient het flesje opnieuw te worden gesloten voordat u dit opbergt.

Stabiliteit: De stabiliteit van het ongeopende product is gewaarborgd van de productiedatum tot de uiterste gebruiksdatum (zie het productetiket voor de uiterste gebruiksdatum). Eenmaal geopend is de stabiliteit gewaarborgd tot 60 dagen na opening. Noteer bij het openen de datum op de fles in het vak "Date opened" (Openingsdatum).

Gebruiksaanwijzing: AdvaCyn® Hydrogel is gebruiksklaar en hoeft niet te worden gemengd of verdund. Breng AdvaCyn® Hydrogel direct op het betrokken gebied aan.

Behandeling: Maak het gebied schoon en dep het droog. Breng een dunne laag AdvaCyn® Hydrogel aan op het betrokken gebied. Gebruik een- of tweemaal per dag met een verband.

Waarschuwingen en aandachtspunten:

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling is verbroken of ontbreekt.
- Uitsluitend voor extern gebruik, niet voor injectie of consumptie.
- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de bestanddelen van het product.
- AdvaCyn® Hydrogel niet gebruiken in combinatie met andere producten voor plaatselijk gebruik zonder het advies van een arts.
- Bij diepe of ernstige wonden, of als u twijfels hebt over de behandeling, raadpleegt u een arts.
- Als er tekenen van infectie optreden (meer pijn, bloeding, pus) of als de wond geen tekenen van genezing vertoont, raadpleegt u een arts.
- Meld eventuele ongewenste reacties aan een arts.
- Naast AdvaCyn® Hydrogel kunnen in sommige geva en systemische en/of lokale antibiotica nodig zijn.
- Buiten het bereik en uit het zicht van kinderen houden.
- Houd de flacon gesloten als deze niet gebruikt wordt.
- AdvaCyn® Hydrogel is onschadelijk, zelfs in geval van accidenteel contact met de ogen, neus of inslikken.





Afvoer: De hydrogel is niet toxisch en is veilig voor het milieu. Voor het afvoeren zijn geen speciale maatregelen vereist.

Bestanddelen: Geëlektrolyseerd Water, Natriumchloride, Natrium-magnesiumhexafluorosilicaat, Natriumfosfaat, hulpstoffen: Natriumhypochloriet en Hypochloorzuur.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK



AdvaCyn®
hydrogel

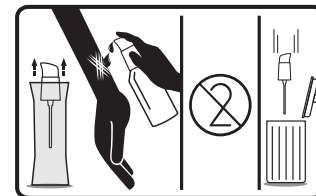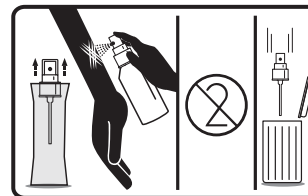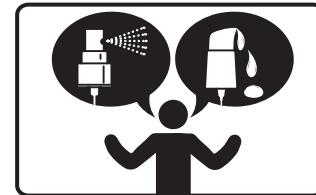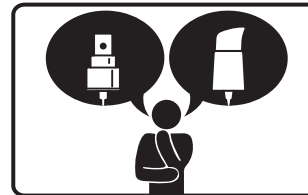

120 mm