

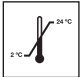



100 mm




AdvaCyn® Wound Care


Gebruiksaanwijzingen


Droog houden




Breekbaar, met zorg hanteren



Uit de zon houden



Oculus Technologies of México S.A. de C.V.
Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte
Zip Code 45130. Zapopan, Jalisco, México.
Phone: + 52 33 38 33 67 22



Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.
(Formerly **Oculus Innovative Sciences Netherlands B.V.**)
Boven de Wolfskuil 3, C30-C32
6049 LX Herten/Roermond The Netherlands
Phone: +31 (0)475 318 666
Fax: +31 (0)475 318 342
www.sonomapharma.eu

IOCRD-025 Rev. 06
June 10th 2021
EOCAC-714 ED-07

100 mm



Gebruiksaanwijzingen:

Indicaties voor gebruik: AdvaCyn® Wound Care is een geëlektrolyseerde oplossing die is bedoeld voor gebruik bij debridement en bevochtiging van chirurgische wonden (intra-operatief en postoperatief) en acute en chronische wonden, zweren, snij-, schaaf- en brandwonden, inclusief wonden in een holte van het menselijk lichaam, zoals in mond, oren of neus. Natriumhypochloriet en hypochloorzuur zijn hulpstoffen die een plaatselijk antimicrobieel effect kunnen hebben. Door de microbiële belasting te verlagen en voor een vochtige omgeving te zorgen stelt de oplossing het lichaam in staat zijn eigen genezingsproces uit te voeren. AdvaCyn® Wound Care kan breed worden toegepast bij een uitgebreide wondbehandeling en is veilig op de slijmvliezen.

Behandeling: AdvaCyn® Wound Care is biocompatibel voor het geïndiceerde gebruik, niet irriterend voor de menselijke huid, ogen of keel en het sensibiliseert de huid niet. Er zijn geen special voorzorgsmaatregelen nodig bij het omgaan met de oplossing.

Bewaring: AdvaCyn® Wound Care dient in het oorspronkelijke afgedichte flesje bij kamertemperatuur te worden bewaard. Bewaren bij kamertemperatuur en zorgen dat het product niet bevriest. Het is niet brandbaar. Na gebruik dient het flesje opnieuw te worden gesloten voordat u dit opbergt.

Stabiliteit: De stabiliteit van het ongeopende product is gewaarborgd van de productiedatum tot de uiterste gebruiksdatum (zie het productetiket voor de uiterste gebruiksdatum). Eenmaal geopend is de stabiliteit gewaarborgd tot 60 dagen na opening. Noteer bij het openen de datum op de fles in het vak "Date opened" (Openingsdatum).

Gebruiksaanwijzing: AdvaCyn® Wound Care is gebruiksklaar en hoeft niet te worden gemengd of verdund. Breng AdvaCyn® Wound Care rechtstreeks op het betrokken gebied aan. Gebruik AdvaCyn® Wound Care telkens bij het verwisselen van het wondverband. Verzadigen van het verband met AdvaCyn® Wound Care vergemakkelijkt het verwijderen van het verband.

Behandeling: Drenk het verband in/verzadig dit met AdvaCyn® Wound Care telkens bij het verwisselen van het verband, waar en wanneer nodig. Onderdempelen is toegelaten gedurende maximaal 15 minuten, dagelijks, aan het begin van de behandeling.

Waarschuwingen en aandachtspunten:

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling is verbroken of ontbreekt.
- Uitsluitend voor extern gebruik, niet voor injectie of consumptie.
- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de bestanddelen van het product.
- AdvaCyn® Wound Care niet gebruiken in combinatie met andere oplossingen voor plaatselijk gebruik zonder het advies van een arts.
- Bij diepe of ernstige wonden, of als u twijfels hebt over de behandeling, raadpleegt u een arts.
- Als er tekenen van infectie optreden (meer pijn, bloeding, pus) of als de wond geen tekenen van genezing vertoont, raadpleegt u een arts.
- Meld eventuele ongewenste reacties aan een arts.
- Naast AdvaCyn® Wound Care kunnen in sommige gevallen systemische en/of lokale antibiotica nodig zijn.
- Buiten het bereik en uit het zicht van kinderen houden.
- Houd de flacon gesloten als deze niet gebruikt wordt.
- AdvaCyn® Wound Care is onschadelijk, zelfs in geval van accidenteel contact met de ogen, neus of inslikken.

Afvoer: De oplossing is niet toxisch en is veilig voor het milieu. Voor het afvoeren zijn geen special maatregelen vereist.

Bestanddelen: Geëlektrolyseerd water (H₂O), Natriumchloride (NaCl), hulpstoffen: Natriumhypochloriet (NaOCl) en Hypochloorzuur (HOCl).

120 mm

