




INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

Protocol toepassing Hyiodine®

Wat zit er in de verpakking Hyiodine?



Flacon Hyiodine

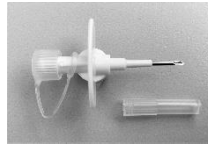

Hyiodine aanpriknaald

Wat is er verder nog nodig?




Eventueel 5 of 10 cc spuit



Kompresen en een secundair verband naar keuze

Aanbrengen met spuitje. Na verwijderen van de plastic deksel van het flesje, de naald van de meegeleverde aanpriknaald in de rubber dop duwen. Na aanbrengen van de aanpriknaald, kan met een spuit de gewenste hoeveelheid Hyiodine opgetrokken worden (zie tabel). De Hyiodine aanbrengen op een kompres van 5x5 of 10x10 cm en inknedem zodat gehele kompres verzadigd is. Kompres uit elkaar trekken en losjes aanbrengen op de wondbodem. Zo nodig de wond verder opvullen met een product naar keuze en afdekken met een secundair verband naar keuze. **Hoe lang mag het in de wond blijven? 1 tot 3 dagen.**

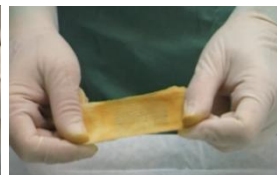


HYIODINE GEL CONSUMPTION

WOUND SIZE	RECOMMENDED AMOUNT
5 x 5 cm	2 ml
7.5 x 7.5 cm	5 ml
10 x 10 cm	7 - 8 ml



Bij kleine diepere wondjes (<3 cm³) of fistels kan de Hyiodine ook direct in de wond aangebracht worden. Afdekken met een product naar keuze. **Hoe lang mag het in de wond blijven? 1 tot 3 dagen.**

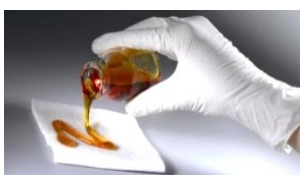

Aanbrengen zonder spuitje. Het is mogelijk de aluminium ring eenvoudig te verwijderen, zodat het flesje geopend kan worden. Toepassing op kompres is gelijk aan met het spuitje.

De natuurlijke ingrediënten van Hyiodine, Hyaluronzuur en Iodine worden geheel in het weefsel opgenomen.

Gekoeld 6 weken houdbaar na openen. Ongekoeld 1 week houdbaar na openen.

Bij vragen: **Raymond van Gerwen** (Raymond@BiologiQ.nl) of **Willem Masker** (Willem@BiologiQ.nl)