

Reduceert
bacteriële
belasting

**Innovatief Wond
Management
Systeem**

**Nieuw
product**



Reinigt
de wond

*State of the Art
Wound Healing*

**Komt voor
vergoeding in
aanmerking**

**Veilig
&
Effectief**

Op basis van
hyalonzuur
en jodium

Regeneratief

Hydraterende
werking voor
vochtig
wondmilieu

Complementair

Hyiodine®



**Wondgel voor diepe en moeilijk
bereikbare (geïnfecteerde) wonden**

**Vraag een gratis
sample aan en start!**

BiologiQ.nl

Vernieuwend in wondgenezing

Wat doet Hyiodine?

- Reinigt de wond en reduceert bacteriële belasting
- Biedt langdurige en effectieve bescherming tegen infectie
- Komt ook in diepe en moeilijk bereikbare (geïnficeerde) wonden
- Geeft goede hydraterende werking voor behoud vochtig wondmilieu
- Kickstart en versnelt de wondgenezing

Wanneer zet je Hyiodine in?

- Bij diepere en/of moeilijk bereikbare wonden
(zowel acute als complexe/stagnerende wonden)
- Diabetische ulcera
- Geïnficeerde of met ontsteking bedreigde wonden
- Niet-helende chirurgische wonden
- Door een ongeluk ontstane (traumatische) wonden

Hoe zet je Hyiodine in?

- Breng Hyiodine aan op een drager/wondverbandgaas
- Bij wonden kleiner dan 3 cm² Hyiodine direct in de wond aanbrengen

DRESSING CHANGE HOW OFTEN?

INFECTED WOUNDS **2 days**

CLEAN WOUNDS **3 days**



HYIODINE GEL CONSUMPTION

WOUND SIZE	RECOMMENDED AMOUNT
5 x 5 cm	2 ml
7,5 x 7,5 cm	5 ml
10 x 10 cm	7 - 8 ml

Interesse om met Hyiodine te starten?

Scan de QR-code aan de voorzijde of stuur een mail naar info@biologiQ.nl en wij zorgen dat je een gratis sample krijgt.

Meer weten over Hyiodine?

Ga naar www.biologiQ.nl en kies Hyiodine.

Hyiodine komt voor
vergoeding in aanmerking.



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



BiologiQ • Watermanstraat 72 • 7324 AK Apeldoorn - NL
T +31(0)55 368 44 60 • F +31(0)55 368 44 66
E Info@BiologiQ.nl • I www.BiologiQ.nl