


Sorelex®

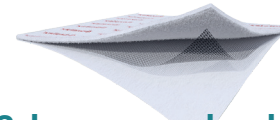

**3-laags wondverband voor de
behandeling van vochtige wonden**

**Vraag een gratis
sample aan en start!**

BiologiQ.nl

Vernieuwend in wondgenezing

Reduceert
bacteriële
belasting

**Innovatief Wond
Management
System**

**Nieuw
product**



Reinigt de
wond, goede
afvoer debris
en exsudaat

*State of the Art
Wound Healing*

**Komt voor
vergoeding in
aanmerking**

**Veilig
&
Effectief**

Op basis van
hyaluronzuur
en octenidine

Regeneratief

Bevordert
granulatie,
beschermt
wondranden

Complementair

Wat doet Sorelex?

- Reinigt de wond en geeft kickstart genezing
- Verticale absorptie, dus goede afvoer debris en exsudaat
- Reduceert de bacteriële belasting
- Regulering vochtthuishouding door hyaluronzuur in wondcontactlaag
- Bevordert granulatie en beschermt wondranden, geen maceratie

Wanneer zet je Sorelex in?

- Bij natte, exsuderende wonden
- Oppervlakkige acute en stagnerende/complexe wonden
- Gecontamineerde of met ontsteking bedreigde wonden
- Veneuze en diabetische voetulcera
- Decubituswonden t/m categorie 3
- Traumatische en chirurgische wonden

Hoe zet je Sorelex in?

- Bij wel of niet-geïnfekteerde wonden
- Bij geïnfekteerde wonden Sorelex 1x per dag vervangen
- Bij niet-geïnfekteerde wonden Sorelex 1x per 3 dagen vervangen
- Maximale draagduur 5 dagen
- Te gebruiken in combinatie met compressietherapie

Interesse om met Sorelex te starten?

Scan de QR-code aan de voorzijde of stuur een mail naar info@biologiQ.nl en wij zorgen dat je een gratis sample krijgt.

Meer weten over Sorelex?

Ga naar www.biologiQ.nl en kies Sorelex.

Sorelex komt voor vergoeding in aanmerking.



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



BiologiQ • Watermanstraat 72 • 7324 AK Apeldoorn - NL

T +31(0)55 368 44 60 • **F** +31(0)55 368 44 66

E Info@BiologiQ.nl • **I** www.BiologiQ.nl