

## BioBag® Gebruikers Gids

### Bewaren


- Tot gebruik in de transportverpakking laten
- **Niet invriezen**
- Niet bewaren bij temperaturen boven de 25 ° C
- Gebruiken vóór de aangegeven uiterste datum
- Voor optimaal resultaat direct gebruiken op de dag van levering

### Conditiecheck

- Controleer voor gebruik of de maden nog leven
- Er moet beweging waarneembaar zijn
- Wel kunnen de maden wat traag of sloom overkomen
- De maden moeten crème tot beige van kleur zijn
- Meld klachten over hun conditie binnen 24 uur na ontvangst
- Stuur BiologiQ een foto of video van de maden vóór ze weg te gooien

### Klaarzetten

- Verbandmiddelen e.d.
- Zoutoplossing of AdvaCyn
- Wondgaas
- Beschermende crème voor de wondomgeving (bijvoorbeeld Aldanex)
- Niet-occlusief (luchtdoorlatend) wondkussen
- Niet-occlusief wondverband, tape of compressieverband
- BioBag®
- Eventueel afvalzak

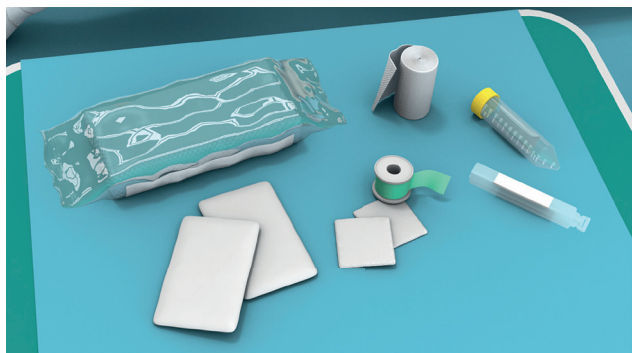

**Klinisch advies nodig of hulp bij het bestellen? Vragen of klachten melden na ontvangst product?**


**Bel of mail BiologiQ** Tel. 055 – 358 4460 of E-mail: [info@biologiQ.nl](mailto:info@biologiQ.nl)



## Hoe BioBag® aan te brengen – stap voor stap

1

### REINIGEN

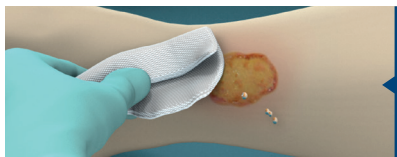

Was de wond schoon met water, zoutoplossing of wondbedvoorbereider (bijvoorbeeld AdvaCyn) om residu van vorig wondverband te verwijderen

2


### BESCHERMEN

Breng een dun laagje beschermende crème (bijvoorbeeld Aldanex) aan op de huid rondom de wond.



3

### CONTROLLEREN

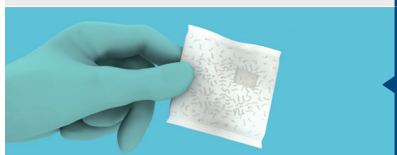

Check of de maden in leven zijn. Zo niet (of bij twijfel), meld dit dan binnen 24 uur aan BiologiQ tel: 055 – 368 4460 of email [info@biologiq.nl](mailto:info@biologiq.nl).

4


### AANBRENGEN

Plaats de BioBag® centraal op of in de wond, zo dat de wondranden gelijkmatig bedekt zijn. Zorg dat er optimaal contact is met het wondbed.



5

### BEVOCHTIGEN

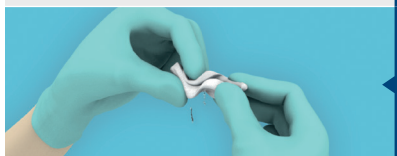


Dompel één of twee gaasjes in de zoutoplossing, wring ze uit en haal ze uit elkaar. Het gaas moet vochtig zijn, niet droog of druipnat

6

### BEDEKKEN

Plaats het vochtige wondgaas en een niet-occlusief, luchtdoorlatend wondverband over de BioBag®. Gebruik geen folie, schuimverband of (super)absorberend materiaal.

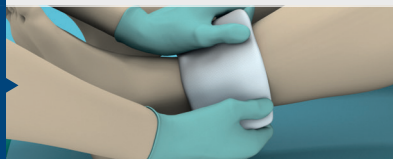

7

### VERBINDEN



Fixeer de BioBag® met daaroverheen het vochtige gaas en het wondverband met niet-occlusief wondverband, tape of compressieverband.

**Klinisch advies nodig of hulp bij het bestellen? Vragen of klachten melden na ontvangst product?**

Bel of mail **BiologiQ** Tel. 055 – 358 4460 of E-mail: [info@biologiq.nl](mailto:info@biologiq.nl)