

CINESTEAM®

BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK



Beschrijving van het wondverband


Cinesteam® is een secundair verband dat is ontworpen om geur te verminderen en exsudaat te absorberen. Het is samengesteld uit een absorberende kern en een zakje met kaneelpoeder.

Voordat u Cinesteam® gebruikt

Raadpleeg voor volledige instructies de gebruiksaanwijzing (IFU) in de doos. Cinesteam® moet over een primaire wond contact laag worden aangebracht en mag niet rechtstreeks op de wond worden aangebracht.

Cinesteam® toepassing

- 1.** Open en verwijder Cinesteam® uit de verpakking.
- 2.** Breng de witte wondcontactlaag van Cinesteam® aan op het primaire verband, zodat het zoveel mogelijk bedekt.
- 3.** Fixeer Cinesteam® indien mogelijk met een zelfklevende pleister of buis of netverband.

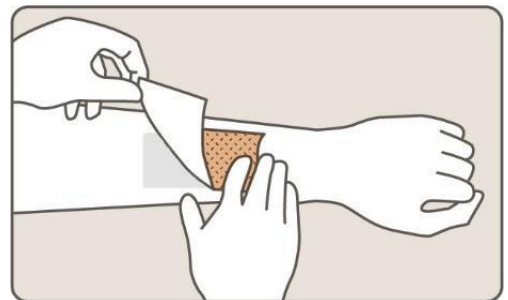

Cinesteam® verbandverwisseling

Verwijder Cinesteam® voorzichtig en vervang het volgens de gebruiksaanwijzing. De frequentie van verbandwissels moet worden aangepast aan het geldende lokale wondverzorgingsprotocol. Cinesteam® kan op zijn plaats blijven zolang de absorptie- en geurmaskeringscapaciteiten voldoende zijn (1 tot 7 dagen). De frequentie van verwisseling is afhankelijk van het exsudaataanbod.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik Cinesteam® niet als primaire absorberende dressing. Beschadig Cinesteam® niet door er in te knippen of snijden, omdat dit kaneellekkage kan veroorzaken. Cinesteam® mag niet worden gebruikt als de primaire verpakking open of beschadigd is of als het verband zelf is gescheurd.

Gebruik Cinesteam® niet samen met een actief houtskoolverband, omdat dit het geur maskerend vermogen kan verminderen.

Bedek Cinesteam® niet met een occlusief fixatie pleister of verband.

Consumeer het kaneel van Cinesteam® niet.

Baden of douchen tijdens het dragen van Cinesteam® is niet toegestaan. Dompel Cinesteam® niet onder in water.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties

Cinesteam® mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor een van de bestanddelen, met name kaneel.

Wettelijke vermeldingen :

Cinesteam® is een secundair anti-geur absorberend verband vervaardigd door CEMAG Care. Cinesteam® is bedoeld om te worden gebruikt voor de behandeling van slecht ruikende wonden. Dit medische hulpmiddel van klasse I voldoet aan de Europese essentiële eisen. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door. Vraag uw zorgverlener, arts, apotheker of verpleegkundige om meer informatie. Uw lokale distributeur of contact@cinesteamcare.com