

Revamil casuïstieken

Casus: Wond na Dupuytren OK 2024 Revamil wondgel

Man, 70+. Niet genezende wond na Dupuytren OK.



Niet genezende wond met veel korstvorming.
Dag 0: Wond gedebrideerd, ontstekingsverschijnselen roodheid, zwelling en warmte. Start behandeling Revamil gel.
Dag 14: Bijna gesloten wond.

Casus: Brandwond voorvoet Revamil Wound Dressing en Revamil Balm

Man, 70+. Letsel veroorzaakt door kookvocht.



Start met Revamil Wound Dressing.
Dag 7: Rood granulerende wond, inzet Revamil Balm op de wondranden.
Dag 32: wond gesloten.

Casus: 9 maanden bestaande decubituswond Revamil Gel en BioPad

Vrouw, o.a. behandeld met Hyfrobier, NPWT zonder enig resultaat.



Wond 2 x 2 x 2 cm. Twee ondermijningen. Licht roze, fibrineus. Start Revamil Gel op collageen 3 x wekelijks. Secundair: Foam.
Dag 102: wondgrootte: 0,5 x 0,4 x 0,4 cm. Geen ondermijningen. Matig exsudatief, rood granulerend.
Dag 155: wond gesloten.

Casus: Decubitus categorie 4 AdvaCyn, Revamil en BioPad

Man, hoge dwarslaesie. 1 nacht verkeerd matras. Actieve mantelzorg.



Aanvang 20 dagen na ontstaan. Start dagelijks Microdacyn en Revamil Melginate. 3 x wekelijks necrotectomie door huisarts.
Dag 19: rood granulerende wonden met 2 ondermijningen. Start Microdacyn, BioPad met Revamil wondgel.
Dag 169: wond gesloten.

Casus: Veneus ulcus AdvaCyn, Granulox en Revamil

Vrouw, 94 jaar. Lang bestaand veneus ulcus linker onderbeen.



Start, 3 x wekelijks Microdacyn, Granulox en Revamil Wound Dressing met absorberend verband.
Dag 6: granulerend wondoppervlak.
Dag 27: wond gesloten en verzorgd met Aldanex.



A BAP Medical Company

INNOVATION IN (Bio)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



Veilige oplossingen voor Wondgenezing en Infectiebestrijding

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing.

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming, die opereert vanuit de visie dat de toekomst van de wondgenezing ligt in innovatieve, bio-actieve en biotech producten. Deze moeten gericht zijn op het stimuleren en ondersteunen van het eigen regeneratief vermogen van het menselijk lichaam en gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van de (complexe) wond. Als bijdrage aan de vereiste kostenbeheersing in de gezondheidszorg streeft BiologiQ er tevens naar effectievere en economisch meer verantwoorde alternatieven te bieden op het gebied van wondgenezing. Dit alles met respect voor milieu, mens en maatschappij.

BiologiQ.nl

© 2025 BiologiQ. Alle Revamil® producten zijn geregistreerde handelsmerken van Bfactory.

Revamil®



Producten met honing voor de behandeling en antibacteriële bescherming van acute en complexe (geïnfecteerde) wonden

Op basis van 100% zuivere honing

Revamil® Wound Care

Wondgel en Wound Dressing met optimale antibacteriële bescherming

Revamil® Melginate

Sterk absorberend honing-geïmpregneerd alginaat wondverband voor optimaal wondmilieu



A BAP Medical Company

INNOVATION IN (Bio)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



Vernieuwend in wondgenezing

GOEDE LOGISTIEK • INNOVATIEVE CONCEPTEN • HIGH QUALITY ALS STANDAARD

BiologiQ • Laan van Westenken 64 • 7336 AZ Apeldoorn - NL
T +31(0)55 368 44 60 • F +31(0)55 368 44 66 • E Info@BiologiQ.nl • I www.BiologiQ.nl

Honing: natuurlijke antibacteriële werking

De Nederlandse producent Bfactory wint de honing voor alle Revamil producten onder gecontroleerde omstandigheden, volgens een aan de Universiteit van Wageningen ontwikkeld procédé. Revamil honing is daarom van reproduceerbare kwaliteit, met een constante, hoge enzymfactor. De antibacteriële en hydrofiele eigenschappen bevorderen de natuurlijke wondgenezing. Omdat Revamil een natuurproduct is, wordt er geen resistentie tegen opgebouwd, zoals bij antibiotica. BiologiQ brengt Revamil in de productcategorieën: Revamil Wound Care (gel en Wound Dressing) en Revamil Melginate (met honing geïmpregneerd alginaat wondverband).

Revamil®

Producten met honing voor langdurige antibacteriële bescherming

Revamil® Wound Care

Wondgel en Wound Dressing met optimale antibacteriële bescherming

Onder deze merknaam brengt BiologiQ een zachte wondgel in twee formaten tubes, doseerspuit en een met honing geïmpregneerd wondverband in diverse formaten. De wondgel, die ook het werkzame bestanddeel vormt in de Revamil Wound Dressings, bestaat uit 100% zuivere medicinale honing voor langdurige antibacteriële bescherming.

Door de sterk hydrofiele werking zorgt Revamil voor een blijvend vochtig wondmilieu. Dit bevordert de weefselregeneratie en bespoedigt de wondheling. Revamil Wound Care is patiënt-vriendelijk omdat het snel de lichaamstemperatuur aanneemt, vrijwel pijnloos op de wond is aan te brengen, niet aan de wond kleeft en wondgeur neutraliseert. Er zijn geen allergische of toxische reacties bekend bij toepassing op wond of gezonde huid.

Revamil® Wound Care

Wondgel en Wound Dressing:

- werkt ontstekingsremmend
- creëert vochtig wondmilieu
- bevordert weefselregeneratie
- versnelt de wondheling



Indicaties

Revamil Wound Care is geïndiceerd bij:

- Diabetische voetulcera
- Ulcus cruris
- Chronische wonden
- Acute wonden
- Geïnfecteerde wonden
- Oncologische bestralingswonden
- Lichte brandwonden (1e/2e graad)
- Decubituswonden

Contra-indicatie

Revamil Wound Care niet gebruiken bij personen met een gebleken honingallergie.

Verpakkingsvormen

Tube wondgel 18 gram, Single Dose Unit 5 gram, Balm (basiszalf met honing) 15 gram en wonddressings. Zie productoverzicht voor maatvoering en aantallen per verpakking. Voor toepassing en gebruiksinstructies: zie meegeleverde bijsluiter.

Conclusies uit onderzoek

Dat honing een wondhelend effect heeft is al honderden jaren bekend. Toch is pas de laatste decennia meer inzicht gekomen in hoe honing werkt. Revamil geeft een antibacteriële bescherming door de combinatie van een lage pH en lage wateractiviteit (osmotische werking). De lage pH en de osmotische werking van de honing maken dat veel pathogene bacteriën niet kunnen groeien. Revamil honing zorgt daarmee voor antibacteriële bescherming. De hoge suikerconcentratie draagt bij aan een vochtig wondmilieu dat de vorming van granulatieweefsel en daarmee de weefselregeneratie bevordert.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Revamil honing het unieke peptide bee defensin bevat dat de antibacteriële bescherming verder versterkt.

Revamil® Melginate

Sterk absorberend honing-geïmpregneerd alginaat wondverband voor optimaal wondmilieu

Revamil Melginate is een wondverband, opgebouwd uit alginaatvezels en gedeeltelijk geïmpregneerd met Revamil honing. De verbandmarges zijn niet geïmpregneerd, om maceratie van de wondranden te voorkomen. Door de specifieke samenstelling (o.a. een hoog gehalte mannuronzuur) van het alginaat treedt na aanbrenging op de wond snel gelvorming op door absorptie van wondvocht. De sterke structuur voorkomt echter dat het verband uiteenvalt en vergemakkelijkt tevens verbandwissels.

Revamil Melginate is hoog absorberend (tot 12 gram wondvocht per 100 cm²), waardoor het bij uitstek geschikt is voor (sterk) exsuderende wonden. De gel lost niet op in wondvocht, wat residu-vorming voorkomt. De combinatie alginaatgel en honing zorgt voor een blijvend vochtig wondmilieu en langdurige bescherming tegen bacteriële invloeden van buitenaf. Qua prijs-prestatieverhouding is Revamil Melginate sterk concurrerend ten opzichte van vergelijkbare wonddressings.

Revamil® Melginate

Honing-geïmpregneerd alginaat wondverband:

- hoog absorptievermogen
- langdurige antibacteriële bescherming
- blijvend vochtig wondmilieu
- ‘eiland-impregnering’ minimaliseert wondrandmaceratie



Indicaties

Revamil Melginate is geïndiceerd bij:

- Geïnfecteerde/exsuderende wonden
- Verschillende typen ulcera
- Decubituswonden
- Chirurgische wonden
- Oncologische bestralingswonden
- Lichte brandwonden (1e/2e graad)

Contra-indicatie

Revamil Melginate niet gebruiken bij personen met een gebleken allergie voor honing of ander bestanddeel van het product.

Verpakkingsvormen

Wonddressings. Zie productoverzicht voor maatvoering en aantallen per verpakking. Voor toepassing en gebruiksinstructies: zie meegeleverde bijsluiter.

Het Kenniscentrum op www.BiologiQ.nl

Voor elk product in het aanbod van BiologiQ vindt u in het Kenniscentrum op onze website aanvullende productinformatie, wetenschappelijke studies, onderzoeksresultaten en andere relevante documentatie.

Revamil® productoverzicht

Productie en CE-registratie

Revamil® producten worden geproduceerd door Bfactory Health Products B.V., Rhenen, Nederland. Revamil® Wound Care en Revamil® Melginate zijn een CE Klasse IIb product (CE 0344). Revamil® Balm is een Klasse IIa product.

Vergoeding

Revamil® Wound Dressings en Revamil® Melginate komen voor vergoeding in aanmerking.

Verpakkingshoeveelheid

Wound Dressing	Productcode	Z-Index nummer
10 stuks 5 x 5 cm.	10307	15616649
7 stuks 8 x 8 cm.	10300	15289877
5 stuks 10 x 20 cm.	10305	15545903
Wondgel tube à 18 gram	10100	14934426
Single Dose Unit 27 tubes à 5 gram	10010	17432359
Balm tube à 15 gram	10500	15382346
Melginate Wound Dressing		
5 stuks 5 x 5 cm.	10380	16855264
5 stuks 10 x 10 cm.	10350	15922421

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie

Revamil® kan worden besteld bij apotheker, groothandel of bij de distributeur BiologiQ: telefoon (055) 368 44 60, fax (055) 368 44 66, e-mail info@BiologiQ.nl